

手ぎわよく懸濁ができ使用後の手入れもかんたん!

新 *new*  
商品

経管投与に

# けんだくん

薬品を入れて攪拌、液体をこぼすことなく  
注入器に吸引でき、使用後もふたを取り外  
しきれいに洗浄できます。



容器80ml

材質:本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)



## 特徴

- 錠剤・散剤などの薬品が入れやすい
- 蓋をして確実に攪拌できる
- カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できる
- こぼすことなく注入器に吸い取れる
- 褐色瓶なので光に弱い薬品でも安心
- 口が大きいので洗しやすい

## 使用方法

- 1.蓋をはずして、一回に服用する薬剤を入れます。
- 2.約55℃の温湯を20ml程度入れて蓋をします。
- 3.そのまま5～10分、置いておきます。
- 4.小さい方の蓋を押さえて、やさしく転倒し混和します。
- 5.小さい方の蓋を取って、注入器を取り付けます。
- 6.左記のように懸濁液を注入器に吸い取ります。